

# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa



60 ml



30 ml

# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa

## Principala indicatie:

Trateaza si previne uscaciunea vaginala



Multi-Gyn LiquiGel elimina imediat senzatiile de uscaciune vaginala

Optimizeaza starea tesutului si creste capacitatea acestuia de a se hidrata si a se vindeca ( se poate folosi si dupa nastere )

Datorita complexului 2 QR, neutralizeaza agentii patogeni

Este ideala pentru a elimina senzatiile de uscaciune locala ce poate aparea in timpul contactului, insertiei de tampoane interne, perioadelor de schimbari hormonale, folosirii diferitelor medicamente

Este un excelent lubrifiant

# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa


## Grup tinta:

- Femei cu uscaciune vaginala, in special pre si post menopauza
- Iritatii la nivelul tesutului vaginal
- Senzatie de uscaciune vaginala datorata insertiei de tampoane, folosirii de sapunuri neadecvate, in perioadele de schimbari hormonale
- Facilitarea contactului – ca lubrifiant
- VB si vaginite in cazul adolescentelor ( pH LiquiGel – 6 )
- In timpul examinarii ginecologice, pentru confort



# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa

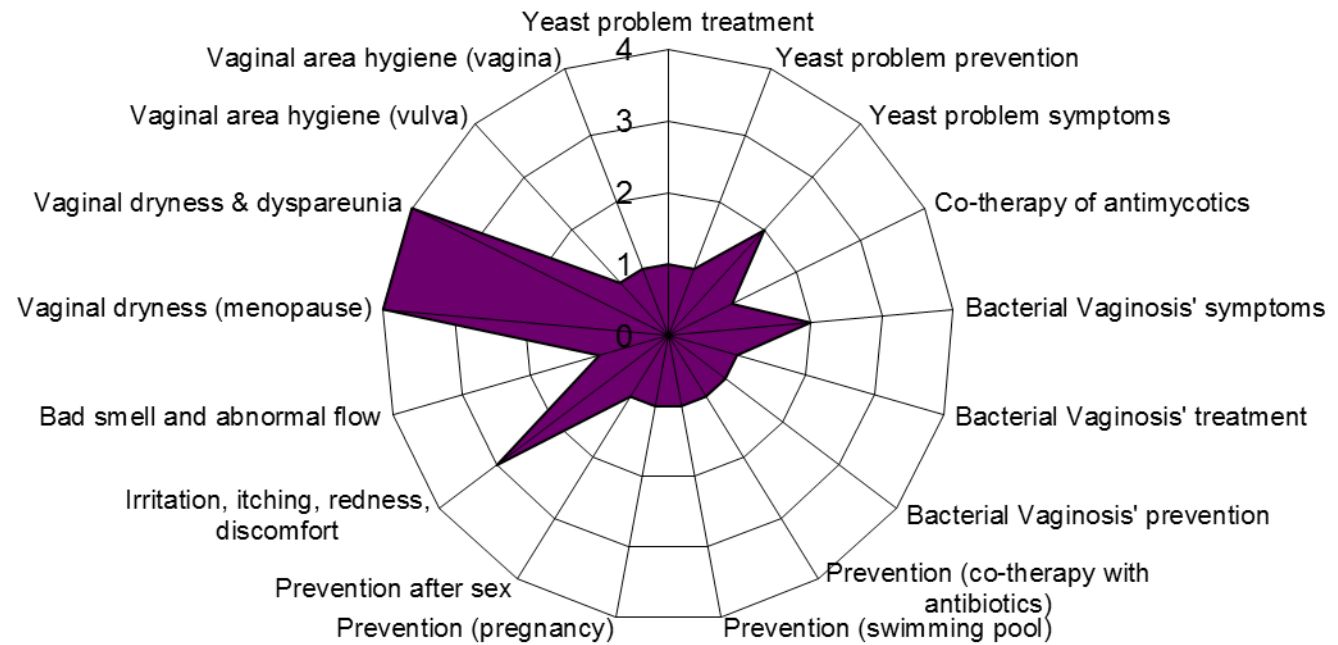

# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa



## Instructiuni de utilizare

- pentru uscaciune vaginala aplicați Multi-Gyn LiquiGel în cantitate ampla cel puțin o data pe zi sau de cate ori simțiți nevoia
- pentru prevenția uscaciunii vaginale și a iritației provocate de aceasta aplicați Multi-Gyn LiquiGel de 2 ori/zi în cantitate ampla, pentru cel puțin 5 zile
- pentru stimularea umidității vaginale aplicați Multi-Gyn LiquiGel în fiecare zi înainte de culcare.

Gelul nu va pata lenjeria intima. Este sigur si delicat si va asigura ameliorarea uscaciunii vaginale, iritatiilor si a mancarimii.

Multi-Gyn LiquiGel nu ar trebui folosit mai mult de 30 de zile consecutiv, astfel flora vaginala sa se poate regla fara suport. In caz ca simptomele persista va rugam sa consultati medicul.

**Multi-Gyn LiquiGel** nu interacționează cu alte medicamente.

## Sarcina si alaptare

Nu sunt cunoscute contraindiciile de folosire a Multi-Gyn LiquiGel in timpul sarcinii si al alaptarii.

# Multi-Gyn® LiquiGel

Medical Device Class IIa



60 ml



30 ml

## **NOU: Liquigel 30 ml cu aplicator**

**Formula imbunatatita, mai concentrata**

**Ingrediente noi ce ofera o lubrifiere mai buna si de lunga durata**

**Se foloseste o cantitate mai mica la fiecare aplicare pentru un efect de lubrifiere similar cu vechea formula**

**Cu aplicator pentru utilizari intravaginale, mai igienic**